


VistaRay Sensorhalter Systemset

VISTARAY SENSOR HOLDER SYSTEM SET

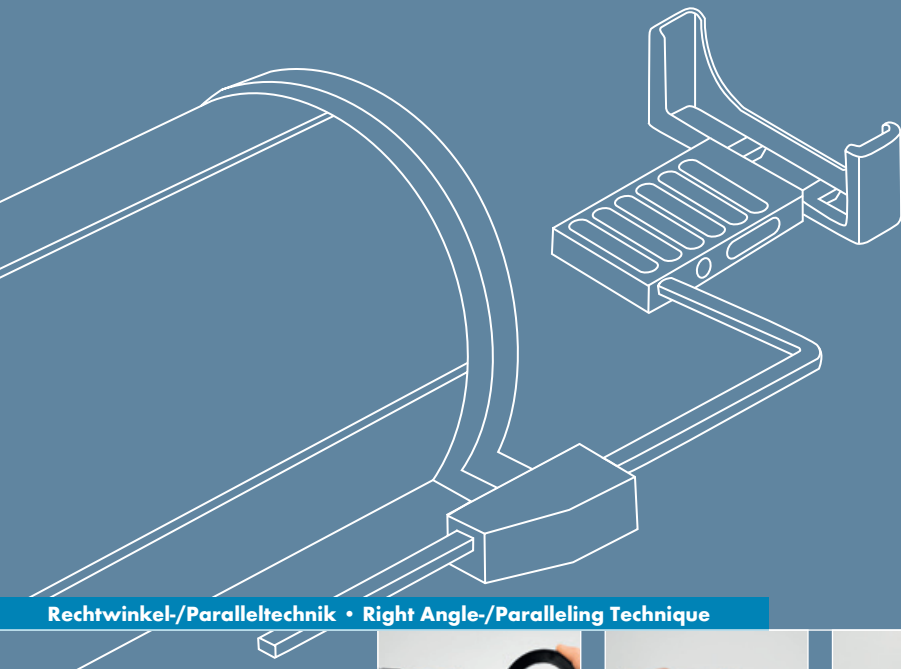

Rechtwinkel-/Paralleltechnik • Right Angle-/Paralleling Technique



Kurzanleitung / DE
Short Manual / EN

 **DÜRR
DENTAL**

Sensorhalter Einzelteile

SENSOR HOLDER PARTS

Führungsstangen: sterilisierbar
Indicator arms: sterilizable



Führungsstange Universal
Indicator arm universal
1 St./pc. Order No.
2130-981-02



Führungsstange Universal
Indicator arm universal
1 St./pc. Order No.
2130-981-02



Führungsstange Endo
Indicator arm endo
1 St./pc. Order No.
2130-981-04



Führungsstange Bissflügel
Indicator arm bitewing
1 St./pc. Order No. **2130-981-03**

Visierringe: autoklavier- und thermodesinfizierbar
Aiming rings: autoclavable and thermoisinfectable



Duo-Visiering Anterior/Posterior/Endo
Duo aiming ring anterior/posterior/endo
1 St./pc. Order No.
2121-981-22



Duo-Visiering Anterior/Posterior/Endo
Duo aiming ring anterior/posterior/endo
1 St./pc. Order No.
2121-981-22



Duo-Visiering Anterior/Posterior/Endo
Duo aiming ring anterior/posterior/endo
1 St./pc. Order No.
2121-981-22



IPL Visiering Bissflügel
IPL aiming ring bitewing
1 St./pc. Order No.
2121-981-23



Bissplatte Anterior
Bite block anterior
4 St./pcs. Order No.
2121-981-71



Bissplatte, Posterior
Bite block posterior
4 St./pcs. Order No.
2121-981-72



Bissplatte-Endosatz
Bite blocks endo
2 St./pcs. Order No.
2121-981-74



Bissplatte Bissflügel
Bite block bitewing
4 St./pcs. Order No.
2121-981-73

Kabelschlitten (Clip zur Fixierung des Sensorkabels am Gestänge) Cable clip (for fastening the sensor cable to the indicator arm)
4 St./pcs. Order No. **2121-981-31**

Zusammenbau der Sensorhalterteile

ASSEMBLY OF THE SENSOR HOLDER PARTS



- 1. Für Aufnahmen im Frontzahnbereich**
For radiographs in the anterior region



- 2. Für Aufnahmen im Seitenzahnbereich**
For radiographs in the posterior region



- 3. Für Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen**
For endometric radiographs during endodontic treatments



- 4. Für Bissflügel-aufnahmen**
For Bite Wing radiographs

Sensorhalter Einzelteile

SENSOR HOLDER PARTS

Führungsstangen: sterilisierbar
Indicator arms: sterilizable



Führungsstange Universal
Indicator arm universal
1 St./pc. Order No.
2130-981-02



Führungsstange Universal
Indicator arm universal
1 St./pc. Order No.
2130-981-02



Führungsstange Endo
Indicator arm endo
1 St./pc. Order No.
2130-981-04



Führungsstange Bissflügel
Indicator arm bitewing
1 St./pc. Order No.
2130-981-03

Visieringe mit Bleiblende und Fenster: wischdesinfizierbar (optional erhältlich)
Aiming rings with lead window: wipe disinfectable (optional available)



Visiering mit Bleiblende 2x3 Anterior
Aiming ring with lead window 2x3 anterior
1 St./pc. Order No.
2130100038



Visiering m. Bleiblende Posterior
Aiming ring with lead window posterior
1 St./pc. Order No.
2130-981-26



Visiering mit Bleiblende 2x3 Endo
Aiming ring with lead window 2x3 endo
1 St./pc. Order No.
2130100038



Visiering m. Bleiblende Bissflügel
Aiming ring with lead window bitewing
1 St./pc. Order No.
2130-981-24



Bissplatte Anterior
Bite block anterior
4 St./pcs. Order No.
2121-981-71



Bissplatte Posterior
Bite block posterior
4 St./pcs. Order No.
2121-981-72



Bissplatte-Endosatz
Bite blocks endo
2 St./pcs. Order No.
2121-981-74



Bissplatte Bissflügel
Bite block bitewing
4 St./pcs. Order No. **2121-981-73**




Kabellschlitten (Clip zur Fixierung des Sensorkabels am Gestänge)
Cable clip (for fastening the sensor cable to the indicator arm)
4 St./pcs. Order No. **2121-981-31**

Zusammenbau der Sensorhalterteile

ASSEMBLY OF THE SENSOR HOLDER PARTS



- 1. Für Aufnahmen im Frontzahnbereich**
For radiographs in the anterior region

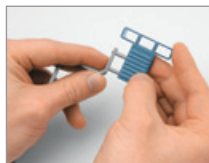

- 2. Für Aufnahmen im Seitenzahnbereich**
For radiographs in the posterior region



- 3. Für Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen**
For endometric radiographs during endodontic treatments



- 4. Für Bissflügel-aufnahmen**
For Bite Wing radiographs

Impressum

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Leitfadens darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Kentzler-Kaschner Dental GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Imprint

All rights reserved, esp. the copy and distribution right, as well as translations. No part of the manual is allowed to be reproduced in any form (p.ex. copy, micro film or other reproducing methods) without the written permission of the Kentzler-Kaschner Dental company nor to be recorded, processed, copied or distributed using electronic systems.



Kentzler-Kaschner Dental GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen
Germany



DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

