

Vector® cleaner

Spetsiaalne puhastusvahend voolikusüsteemile



Vector® cleaner on spetsiaalne puhastusvahend happes lahustuva mustuse eemaldamiseks Dürr Dental Vector® Paro/Vector® voolikusüsteemis ja otsikus. Vector® cleaner paistab silma iseäranis intensiivse puhastava mõju ja väga hea materjalide sobivuse poolest

Koostis: Vector® cleaner sisaldab: anorgaanilisi happeid (5 -15 %), tensiide (< 1 %) ja abiaineid vesilahuses.

Kasutamine: Vector® Paro/Vector® puhastamine tuleb läbi viia Vector® kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seda on vaja teha 50 töötunni järel või iga 4 nädala tagant. Vector® cleaner'it kasutatakse lahjendamata kujul. Lisada ca 500 ml/50 ml Vector® cleaner'it Vector® Paro/Vector® veemahutisse ja teostada puhastamine vastavalt Vector® Paro/Vector® seadme kasutusjuhendile. Lasta tootel mõjuda 10 minutit, max 60 minutit. Seejärel loputada voolikud ja otsik vastavalt Vector® Paro/Vector® seadme kasutusjuhendile põhjalikult veega.

Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisumahu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkti).